

4. 无影响配戴的全身性疾病；
5. 环境条件、卫生条件和工作条件能满足本产品的配戴要求；
6. 依从性好，能及时、定期按要求前往医疗机构就诊。

【适用人群】

- ◆本塑形镜用于希望在一天中的某一时段（如游泳和其他体育运动、社交等活动时）不用配戴框架眼镜或接触镜而仍能够看得清楚的患者；
- ◆本品也可用于不喜欢戴框架眼镜并且外部条件（比如烟、有毒气体或低湿度环境）也不适合配戴接触镜的职业（比如，坑道工、航空乘务员）。

【禁忌症】

以下任一情形均不得配戴：

1. 不符合前述【适用范围】的患者；
2. 8岁以下儿童禁用；
3. 不规则角膜散光的患者；
4. 斜视的患者；
5. 细菌性、真菌性、病毒性等活动性角膜感染，或其他眼前节急性、慢性炎症的患者；

6. 角膜上皮明显荧光染色的患者；
7. 干眼症的患者；
8. 正在使用可能会导致干眼或影响视力及角膜曲率等药物的患者；
9. 角膜内皮细胞密度少于2000个/mm²的患者；
10. 有角膜异常，曾经接受过角膜手术，或有角膜外伤史，角膜知觉减退，角膜上皮缺损的患者；
11. 其他眼部疾病：如泪囊炎、结膜炎、眼压异常、睑缘炎、眼前段的急性及亚急性炎症、葡萄膜炎等各种炎症、青光眼及泪器疾病等的患者；
12. 患有全身性疾病造成免疫低下，或对角膜塑形有影响的患者（如急、慢性鼻窦炎，糖尿病，唐氏综合症，类风湿性关节炎，精神病患者等）；
13. 有接触镜或接触镜护理液过敏史的患者；
14. 孕期、哺乳期或近期计划怀孕的患者；
15. 其他患有被眼科医师判断为不适合配戴角膜塑形镜的疾病的患者；
16. 不能遵从眼科医师指示的患者；
17. 无法正确使用塑形镜的患者；
18. 不能接受定期复查的患者；
19. 无法对自己进行卫生管理，不能满足使用塑形镜所需卫生条件的患者；
20. 从事需要长时间保持正常视力，且当视力发生变化时，很难休息职业的患者。